


Verificare la presenza di sintomi di
arresto cardiaco improvviso:

- ☑ non risponde
- ☑ non respira regolarmente


1 TIRARE

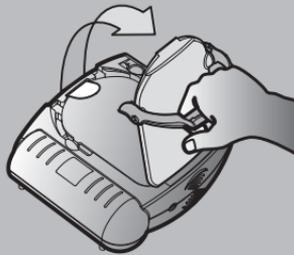

2 APPLICARE




3 PREMERE

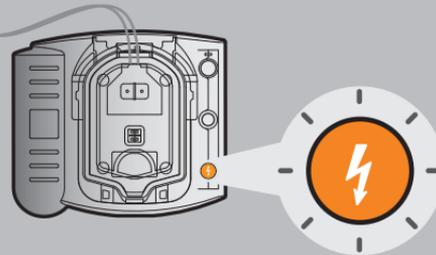

SCHEDA DI RAPIDA CONSULTAZIONE


ISTRUZIONI DETTAGLIATE

Per iniziare: Tirare l'impugnatura.
Togliere la copertura protettiva.

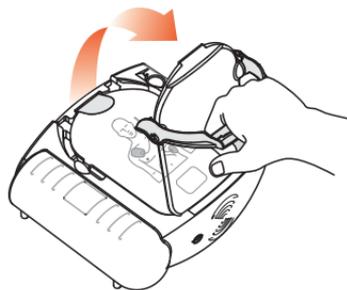


1

Rimuovere gli indumenti dal torace del paziente.
Pulire e asciugare l'epidermide, se necessario.

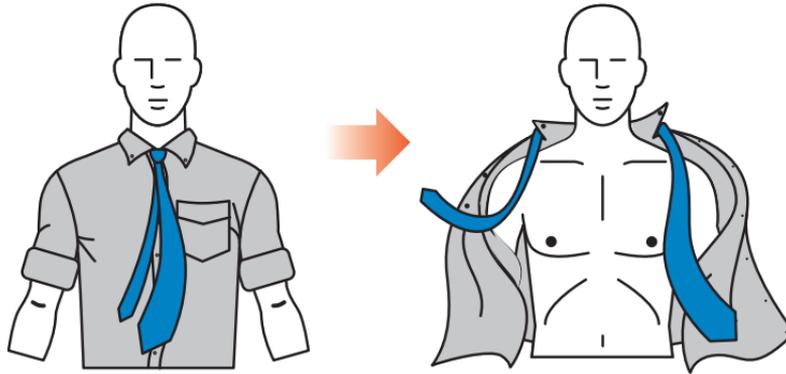


Staccare la pellicola di protezione e rimuovere gli elettrodi.


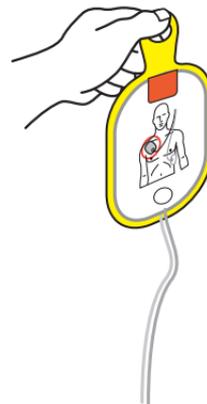


3

Staccare gli elettrodi adesivi
dal rivestimento in plastica gialla.

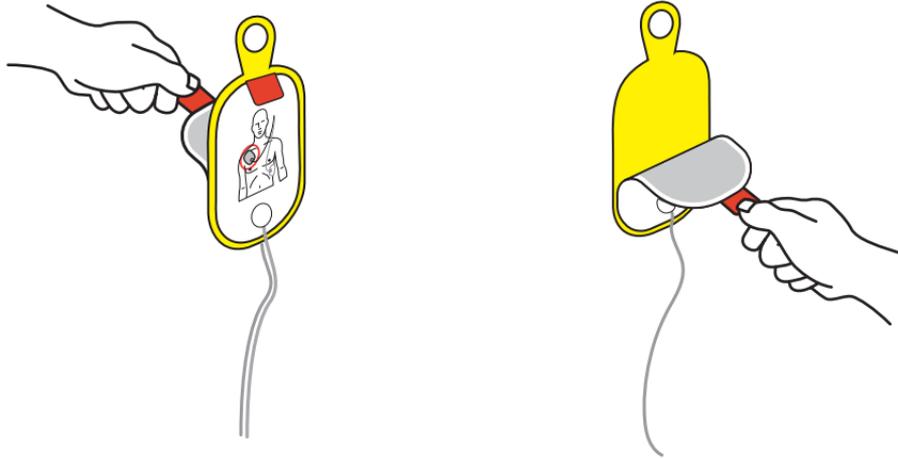

Posizionare gli elettrodi esattamente
come mostrato nella figura.

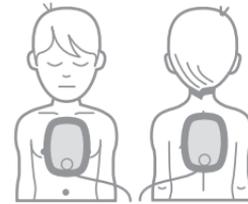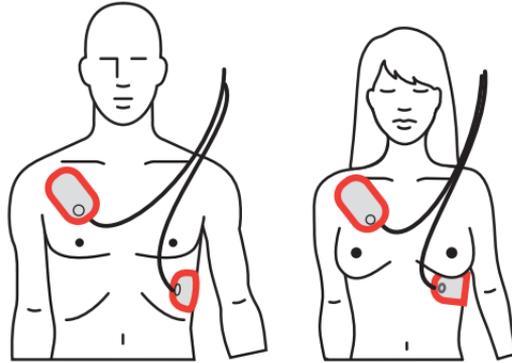


(0-8 ANNI) < 25 kg

Analisi en corso ... Non toccare il paziente!


Attendere fino a che  smette di lampeggiare



Per erogare la scarica: Premere il pulsante lampeggiante
ARANCIONE. Non toccare il paziente.

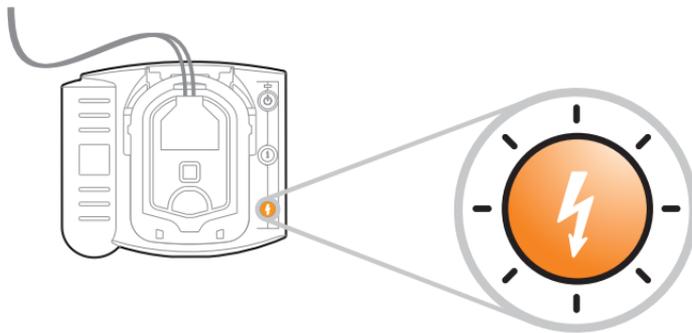


Per il soccorso con RCP:
Premere il pulsante lampeggiante **BLU**.

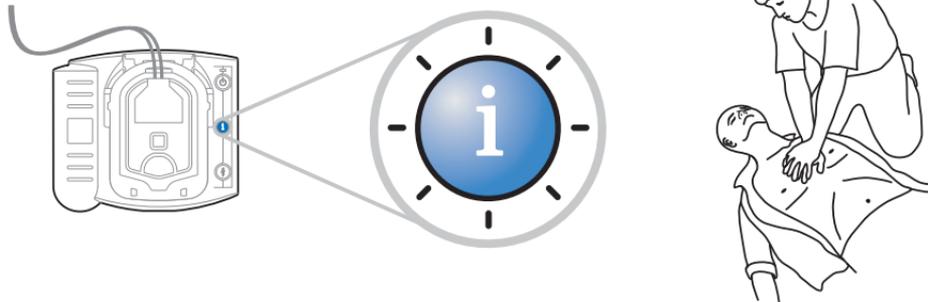


30 compressioni • stringere il naso, inclinare la testa • soffiare a fondo 2 volte

Per accendere il dispositivo:
premere il pulsante **VERDE** di accensione/spengimento.

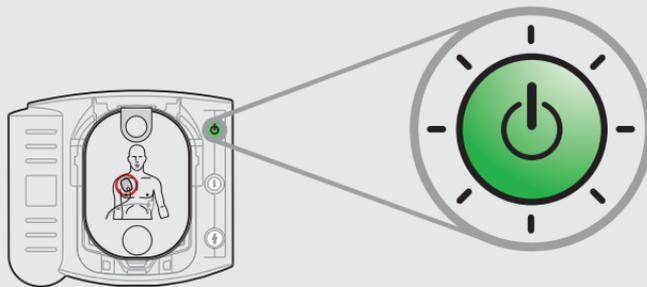

Se la cartuccia deve essere sostituita:
Far scorrere il dispositivo di aggancio.

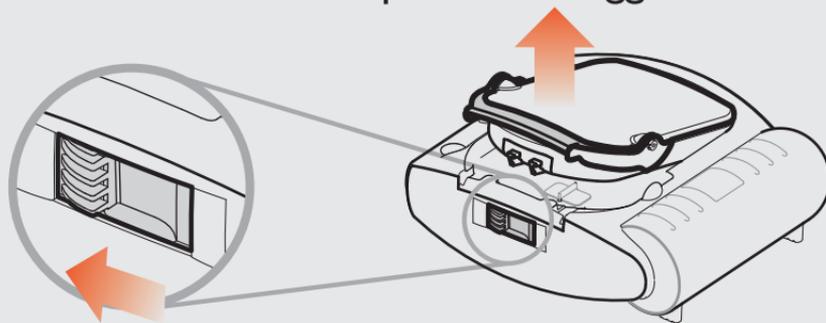

Stampato negli U.S.A.

Philips Medical Systems
Bothell, WA 98021-8431, USA

Copyright © 2010
Philips Electronics North American Corp

453564141812 REV V

REF M5066-97805



453564141812

PHILIPS