

MANUTENZIONE DELL'UNITÀ HEARTSTART

MANUTENZIONE ABITUALE

Le operazioni di manutenzione dell'unità HeartStart sono molto semplici.

Il defibrillatore esegue un autotest ogni giorno.

Inoltre, esegue un autotest ogni volta che si installa una batteria nel dispositivo. Grazie alle funzionalità di autotest, HeartStart non necessita di calibrazioni manuali.

Il dispositivo HeartStart non ha componenti che possano essere riparate dall'utente.

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

Non aprire il defibrillatore HeartStart,, non rimuovere i pannelli o tentare di ripararlo. Il defibrillatore HeartStart non contiene componenti che possano essere riparati dall'utente. Se occorre riparare, restituire l'unità HeartStart alla Philips.

AVVERTIMENTI

- Dopo circa un minuto senza una cartuccia installata, il defibrillatore HeartStart inizia ad emettere segnali acustici e il pulsante “ i ” inizia a lampeggiare.
 - L'unità HeartStart esegue un autotest ogni giorno. Finché la spia verde di pronto al funzionamento lampeggia non è necessario eseguire il test del defibrillatore.
- L'autotest consuma la batteria causandone lo scaricamento precoce.

CONTROLLI PERIODICI

Ad eccezione dei controlli consigliati dopo ogni utilizzo dell'unità HeartStart, la manutenzione è limitata ad un controllo periodico di quanto segue:

- Controllo della spia verde di pronto al funzionamento. Se la spia verde di pronto al funzionamento non lampeggia, consultare i suggerimenti sulla soluzione dei possibili problemi riportati di seguito.
- Sostituire eventuali forniture e accessori usati, danneggiati o scaduti.
- Controllare la parte esterna del defibrillatore. Se sono presenti incrinature o altri segni di danni, contattare la Philips per assistenza tecnica.

Annotare ogni controllo periodico nel registro delle ispezioni/libretto di manutenzione.

PULIZIA DELL'UNITÀ HEARTSTART

È possibile pulire la parte esterna e la borsa di trasporto dell'unità HeartStart con un panno morbido, inumidito con acqua saponata, candeggina (2 cucchiaini ogni quarto di litro d'acqua), o detersivi contenenti ammoniaca.

AVVERTIMENTI

- Non usare alcol isopropilico (abrasivo), solventi forti quali acetone o detersivi a base di acetone, materiali abrasivi o detersivi enzimatici per pulire il HeartStart.
- Non immergere il HeartStart in liquidi né versare liquidi su di esso.
- Non sterilizzare il defibrillatore o i suoi accessori.